

ПОДГОТОВКА КРЕСЛА К РАБОТЕ


- 1

Убедитесь, что шнур питания не имеет повреждений внешней изоляции. Подключите шнур питания кресла к розетке питающей сети.
- 2


Переключите клавишу электропитания кресла в положение «Включено». Убедитесь, что световой индикатор на пульте управления светится после включения питания.
- 3

Проверьте работу педали приведения кресла в антишоковое положение путём нажатия и удержания педали. Выполните проверку педали с каждой стороны.
- 4

Проверьте работу каждой кнопки пульта управления. При нажатии и удерживании кнопок соответствующие секции кресла должны менять своё положение. Убедитесь, что движение происходит плавно и без рывков.

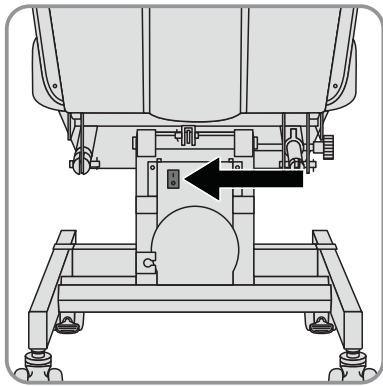


Включение кресла «Стандарт»

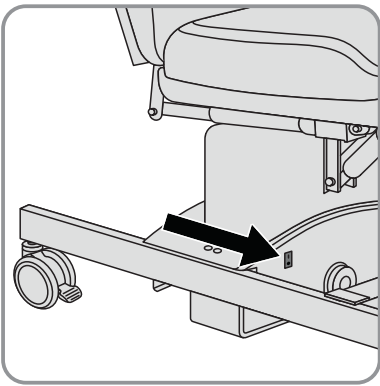

Включение кресла «Универсал»



Клавиша электропитания

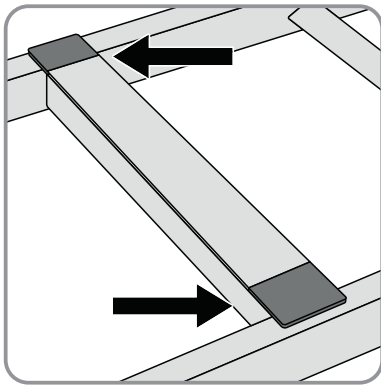

Педали антишокового положения





Педаль антишокового положения **не должна использоваться для регулировки положения секций кресла в обычных условиях.**

АНТИШОКОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – особое положение, в котором находится пациент при коллапсе или шоке, которое увеличивает приток крови к головному мозгу (лёжа на спине под углом до 45 ° с приподнятым по отношению к голове тазом).

При активации педали приведения кресла в антишоковое положение спинная секция опускается, а тазобедренная и голеностопная секции поднимаются.

Движение секций происходит синхронно.

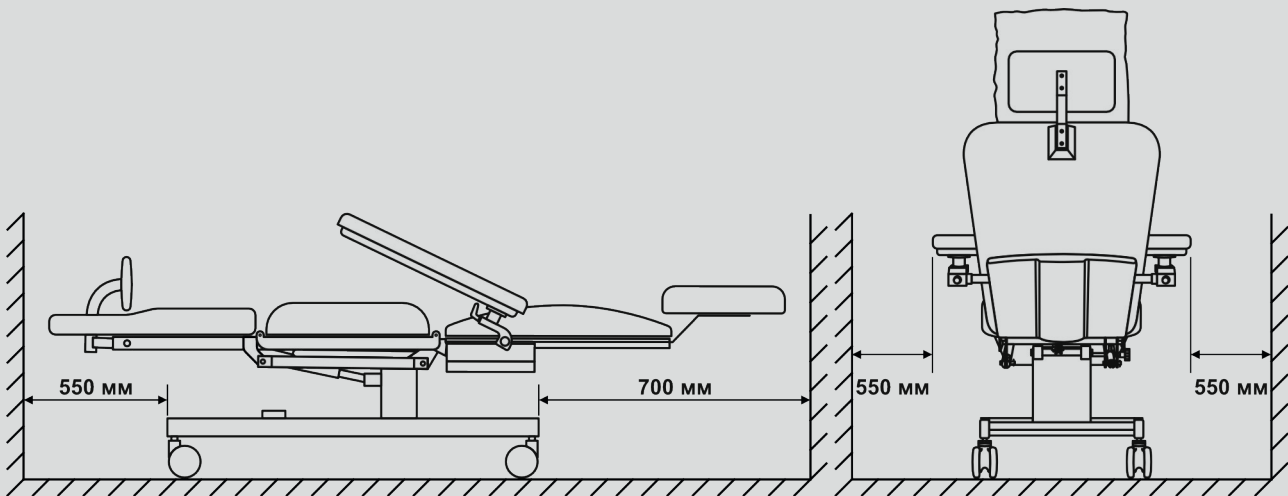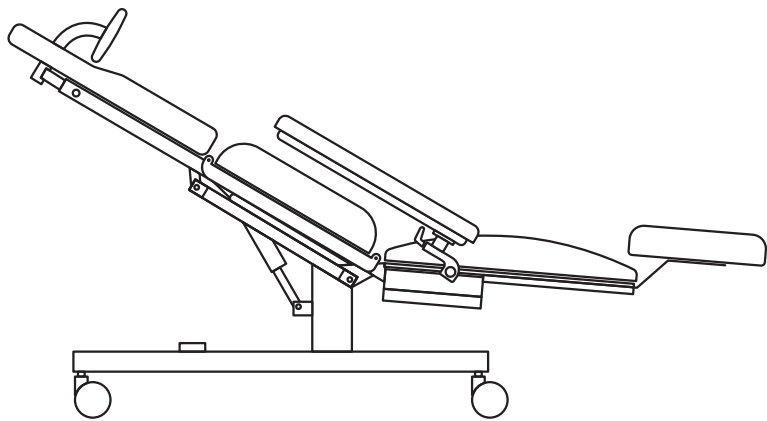

При установке кресла необходимо учитывать положение объектов, расположенных рядом.

Габариты кресла могут меняться при регулировке положения секций.



**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАЦИЕНТОВ**

**ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для
ТРАНСПОРТИРОВКИ ПАЦИЕНТОВ!**

**РИСК ТРАВМИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТА
или ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ!**



Перед эксплуатацией необходимо зафиксировать ролики ножным тормозом.



Осторожно! Возможно травмирование ног в зоне движущихся частей.



Запрещено опираться на голеностопную секцию при посадке.



Запрещено садиться на спинную секцию в разложенном состоянии.